

ラッププロテクター使用手順




皮膚切開は3cm + α



皮下の止血をする



筋膜、筋肉、骨膜を
しっかり剥がす

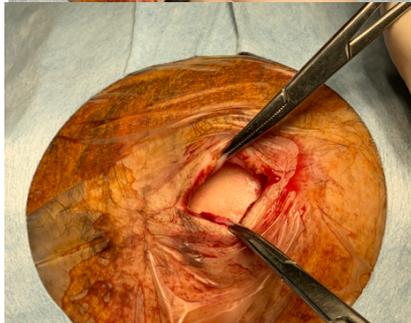

筋膜、筋肉、骨膜を
ペアンで把持する



小さい方の輪を骨膜
の下に押し込みます




ペアンを外したら
セット完了です。

うまく入らない時は切開が小さいか、
骨膜の剥離が不十分かもしれません。

慢性硬膜下血腫



骨粉も上手く集める
ことができます

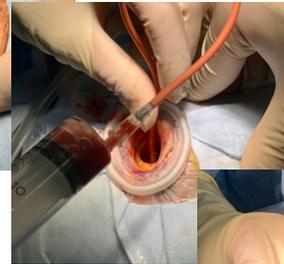


洗浄液も上手くポ
ケットに流れます



内視鏡下脳内血腫除去術

磁場式ナビゲーションに干渉しません

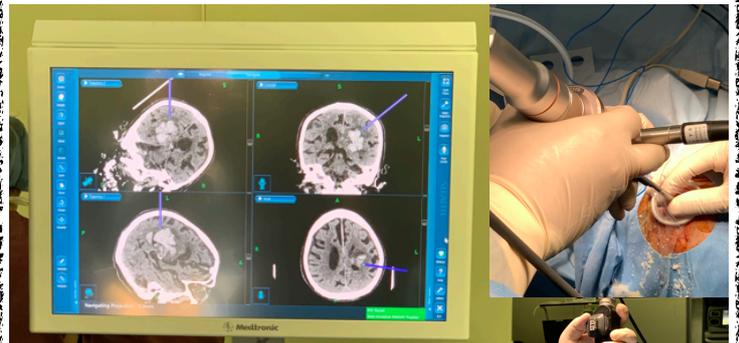

閉創はラッププロテクターを外し通常と同様で
す。ドレープの下が汚れにくいのも利点です。